




TriGO

HOE AFMETINGEN NEMEN



ZITBREEDTE

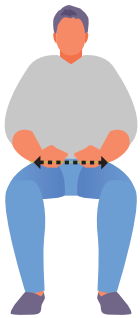


De persoon zit op een stoel of een vlakke ondergrond. Gebruik een meetlat of een lintmeter, neem de afstand tussen de twee heupen en voeg 2 cm bij.



ZITBREEDTE

Op uw **Trigo** kan de zitbreedte gemeten worden door eerst en vooral het zitkussen te verwijderen. Meet vervolgens de afstand tussen de twee uiterste buizen.

ZITDIEPTE

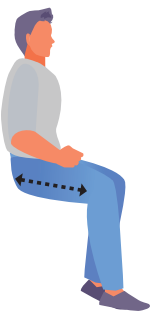


De persoon zit op een stoel of een vlakke ondergrond. Neem de afstand tussen de onderrug en de knieholte. Verminder deze afmeting met 3 tot 4 cm.



ZITDIEPTE

Op uw **Trigo** kan de zitdiepte gemeten worden door eerst en vooral het zitkussen te verwijderen. Vervolgens meet u de afstand tussen de buis van de rugleuning en de voorkant van de zitting.

HOOGTE RUGSTEUN

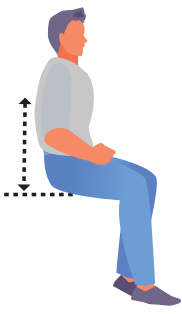

De persoon zit op een stoel of een vlakke ondergrond. Meet de afstand tussen de zitting en het midden van de schouderbladen.


Als de gebruiker meer ondersteuning nodig heeft, kan de rugsteun hoger gezet worden. Als de gebruiker een actievere houding wenst, kan de rugsteun verlaagd worden.



HOOGTE RUGSTEUN

Op uw **Trigo** kan de hoogte van de rugsteun gemeten worden door eerst en vooral het zitkussen te verwijderen. Vervolgens meet u de afstand tussen de basis van de rugleuning buis en het bovenste deel van de rugleuning.

LENGTE VOETSTEUN

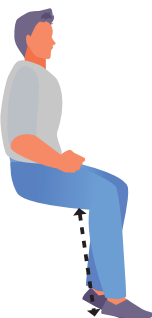


De persoon zit op een stoel of een vlakke ondergrond. Meet de afstand tussen de knieholte en de hiel van de gebruiker. Trek hier de dikte van het gebruikte kussen af.



LENGTE VOETSTEUN

Op uw **Trigo** kan de hoogte voor de voetsteun gemeten worden door eerst en vooral het zitkussen te verwijderen. Vervolgens meet u de afstand tussen de voorkant van de zitting en de binnenkant van de voetsteun.

ZITHOOGTE VOOR- & ACHTER

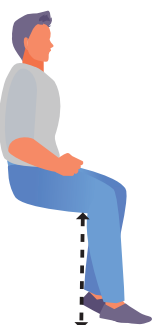

De persoon zit op een stoel of een vlakke ondergrond. **Voorzijde:** Meet de afstand tussen de knieholte en de grond. Voeg hier 3 tot 5 cm aan toe zodat de voetsteun de grond niet raakt. **Achterzijde:** Dit zal afhangen van de gekozen zitinclinatie en zitdiepte.



ZITHOOGTE VOOR- & ACHTER

Op uw **Trigo** kan de zithoogte aan de voorzijde (blauwe pijl) gemeten worden door eerst en vooral het zitkussen te verwijderen. Meet vervolgens de afstand tussen de grond and de voorkant van de zitting. Op dezelfde manier kan de zithoogte aan de achterzijde (groene pijl) gemeten worden.