

# Alya

Compact als een koffer



*Compact formaat voor transport*

De **Alya** is een zeer compacte en vouwbare scooter. De Alya is makkelijk mee te nemen waardoor de gebruiker altijd en overal toegang heeft tot het gebruik van zijn scooter. Met zijn grote rijafstand vindt hij evenwel ook zijn weg naar buiten.



- Telescopische stuurkolom
- Duidelijke batterij indicatie
- Afneembare contactsleutel

Neerklapbare stoel voor transport



*Zilvergrijs model met 17,4 Ah batterijen*

- Uitneembare lithium ION batterijen
- Voetsteun













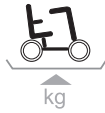

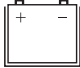

*Rood model met 11,6 Ah batterijen*



Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

# Technische informatie **Alya**

								
6	12,8 18,6*	6°/10%	40	1420				
								
420	710-910	905	165x50 (4)	110	19,6 20,1*	115	24V / 11,6Ah 24V / 17,4Ah	180W

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%). \* Enkel voor het zilvergrijze model

## Transport

De **Alya** scooter is een perfecte transport scooter. Licht in gewicht en compact in omvang en opklapbaar in minder dan een minuut en meeneembaar. Ideaal voor korte afstanden en extra handig om te besturen.



## Compleet opklapbaar

Zet de **Alya** uit en verwijder de contactsleutel. Verlaag de stuurkolom tot de laagste positie en trek achteraan de gele hendel omhoog. Duw het zitgedeelte vervolgens omlaag.

Vouw de voetplaat omhoog en schuif de **Alya** in elkaar. Trek aan de gele knop onderaan de stuurkolom en beweeg deze naar beneden. Nu is de **Alya** volledig klaar voor transport.

## Kleuren



zilver grijs 17,4 Ah rood 11,6Ah

## Uw garantie op kwaliteit.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.

## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout - België  
Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl) - [orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit



Voorbehouden technische wijzigingen