

# VERMEIREN

378

GEBRUIKSAANWIJZING





## Inhoud

Inhoud .....	1
1 Voorwoord .....	1
2 Uw product.....	1
3 Voor gebruik .....	1
4 Montage en aanpassingen.....	2
5 Uw tafel gebruiken.....	3
6 Onderhoud .....	3
7 Technische gegevens .....	4

## 1 Voorwoord

Bedankt voor uw vertrouwen in de producten van Vermeiren. Om u te ondersteunen bij het gebruik van dit product en zijn bedieningsmogelijkheden, bieden we u deze handleiding aan. Lees deze informatie zorgvuldig door: het zal u helpen om vertrouwd te raken met de besturing, mogelijkheden en beperkingen van uw product.

Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.

### Belangrijke opmerking

Om uw veiligheid te garanderen, en om de levensduur van uw product te verlengen, raden we u aan om er goed zorg voor te dragen en om regelmatig nazicht en onderhoud te laten uitvoeren.

Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma Vermeiren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit type product door te voeren zonder verplicht te zijn om voordien geleverde producten aan te passen of te vervangen.

Afbeeldingen van het product worden gebruikt om de instructies in deze handleiding te verduidelijken. Details van het afgebeelde product kunnen afwijken van uw aangekochte product.


### Beschikbare informatie

Op onze website <http://www.vermeiren.com/> kan u steeds de meest recente versie terugvinden van de informatie in deze handleiding. Contacteer deze website regelmatig voor mogelijke updates.

Mensen met een visuele beperking kunnen de elektronische versie van deze handleiding

downloaden en laten voorlezen door een tekst-naar-spraak programma.

## 2 Uw product

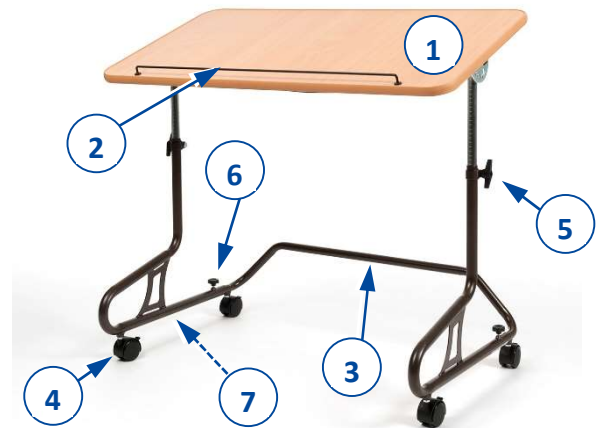

1. Tafelblad
2. Richel
3. Onderframe
4. Wielen met remmen
5. Vleugelmoer hoogteverstelling
6. Sterknop voor diepteverstelling
7. Identificatieplaat

## 3 Voor gebruik

### 3.1 Bij levering

Pak uw product uit en verifieer of de levering compleet is. Volgende onderdelen zijn bij de levering ingesloten:

- Onderframe (inclusief 4 wielen met rem)
- Bovenframe (incl. verstelbaar tafelblad)
- Handleiding

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer blijkt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de transporteur.

### 3.2 Bedoeld gebruik

- Deze tafel wordt gebruikt om voorwerpen op te leggen wanneer u in uw comfortstoel, zitschaalstoel of liftzetel zit.
- De maximaal toegestane belasting voor de tafel is 10kg.
- De tafel is bedoeld voor gebruik binnen, op vlakke ondergrond. Wanneer in gebruik, controleer of de 4 wielen op de grond staan.
- De tafel is niet bedoeld om objecten of personen te ondersteunen of transporteren.
- De garantie op dit product is gebaseerd op normaal gebruik en onderhoud zoals

beschreven in deze handleiding. De garantie vervalt bij schade die werd veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.

### 3.3 Veiligheidsinstructies



VOORZICHTIG

#### Kans op letsel en/of schade

- Ga niet op de buizen van het onderframe staan omdat de tafel dan kan omkantelen.
- Leun niet tegen of op het tafelblad.
- Hef de tafel niet aan het tafelblad op.
- Plaats geen voorwerpen op de tafel die groter zijn dan het blad.
- Overschrijd de draagcapaciteit van de tafel niet.
- Transporteer geen personen of voorwerpen op de tafel.
- Reparaties mogen alleen door opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Volg de instructies voor verzorging en controle. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door niet juiste controles / verzorging.

### 3.4 Transport en opslag

Transport en opslag van de tafel moet gebeuren volgens de specificaties in §7. Bewaar de rollator droog.

Bescherm de tafel tegen roest en het binnendringen van vreemde stoffen (bijv. zout water, zeelucht, zand, stof) middels een degelijke afscherming of verpakking).

Zorg er bij het opbergen voor dat er geen andere voorwerpen op of tegen de tafel liggen waardoor de tafel beschadigd kan worden.

## 4 Montage en aanpassingen

### 4.1 Montage

De tafel wordt volledig gemonteerd geleverd. De vleugelmoeren en sterknoppen moeten aangedraaid zijn alvorens enige voorwerpen op het tafelblad te leggen.

### 4.2 Aanpassingen




VOORZICHTIG

#### Kans op letsel

- De stabiliteit wordt beïnvloed wanneer het tafelblad wordt veresteld (kantelgevaar).

- Het tafelblad mag enkel zo ver veresteld worden dat er niets kan afvallen, voor uw veiligheid is de tafel voorzien van een richel.
- Wanneer u de tafel inclineert zie dat er voldoende ruimte is tussen de tafel en voorwerpen van de stoel en/of andere voorwerpen.

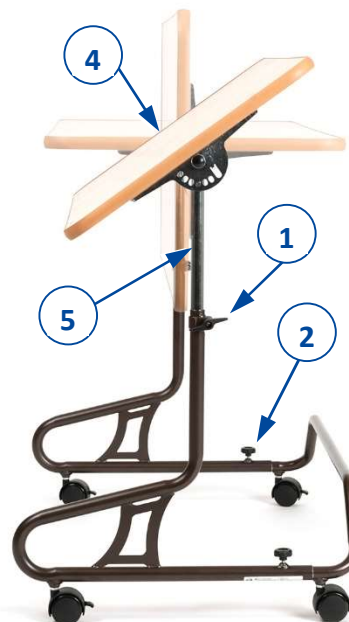

#### 4.2.1 Hoogteverstelling

De hoogteverstelling wordt aangeduid met merklijnen (5) in de buis.

1. Maak de vleugelmoeren (1) aan beide kanten los.
2. Beweeg het tafelblad (4) naar boven of beneden tot de gewenste hoogte is bereikt (bereik: 180 mm: stappen van 10 mm).
3. Draai de vleugelmoeren (1) terug goed vast. Zorg ervoor dat de hoogteverstelling voor beide zijden stevig werd vastgemaakt op dezelfde positie.

#### 4.2.2 Diepteverstelling

1. Draai de sterknop (2) los.
2. Beweeg het onderframe naar voor / achteren tot de gewenste diepte (bereik 250 mm: traploos).

3. Draai de sterknop (2) handvast aan en herhaal aan de andere kant. Controleer of de diepteverstelling goed is vastgemaakt.

Minimale diepte van het inbrengen: 50 mm.

#### 4.2.3 Hoekverstelling

1. Trek aan de riem (3) net onder het tafelblad (4).
2. Blijf trekken aan de riem (3) en draai het tafelblad (4) naar boven of beneden tot de gewenste hoek (bereik 90°: (6 mogelijke posities: stappen van 18°).
3. Laat de riem (3) los. Controleer of de hoekverstelling goed is vastgemaakt.

## 5 Uw tafel gebruiken

### 5.1 Positionering rondom de stoel



### 5.2 De remmen bedienen

**VOORZICHTIG** **Kans op letsel en/of schade**

**Controleer voor elk gebruik de goede werking van de remmen.**


Voor het stationeren van de tafel moeten alle vier de loopwielen worden vergrendeld.

### 5.2.1 De remmen vastzetten [B]

1. Druk met uw voet de remplaat omlaag tot deze stopt.
2. Herhaal voor de andere wielen. De wielen kunnen noch rollen noch draaien.

### 5.2.2 De remmen loszetten [A]

1. Druk met uw voet de remplaat omhoog.
2. Herhaal voor de andere wielen. De wielen worden nu ontgrendeld en kunnen zowel rollen als draaien.

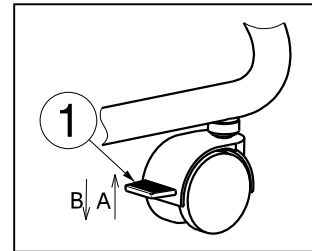

## 6 Onderhoud

### 6.1 Reinigen

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauwwarm water met een milde zeep om de tafel schoon te maken. Vermijd dat onderdelen doorweekt raken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

### 6.2 Desinfectie

**VOORZICHTIG** **Kans op schade**

**Desinfecteren mag enkel gebeuren door opgeleide personen. Raadpleeg hiervoor uw vakhandelaar.**

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauw water met een mild huishoudelijk desinfecterend middel om de tafel te reinigen.

### 6.3 Inspectie / Onderhoud / Reparatie

De verwachte levensduur van uw tafel is 5 jaar. De levensduur wordt beïnvloed door gebruik, opslag, onderhoud, service en reiniging.

Voordat u met uw rollator op pad gaat, moet deze nagekeken worden op volgende punten:

- Volledigheid
- Verstelfuncties
- Controle van de wielen (stabiliteit, spoor, bevestigingsschroeven)

- Controle van de schroefverbindingen en verstelknoppen: goed vastgemaakt. (toestand, schroefdraad, goede borging)
- Frame (vervorming, stabiliteit)
- Tafelblad (gesloten oppervlakken, splinters, scheuren)
- Lakschade (eventuele roestplekken verwijderen en met lak behandelen)

Reparaties en vervangingen mogen enkel door opgeleide personen gebeuren en enkel met originele vervangonderdelen van Vermeiren. Aarzel niet om de service die door uw vakhandelaar aangeboden wordt, te gebruiken. Hij/Zij zal u graag helpen met betrekking tot service en reparaties.

## 6.4 Hergebruik

Voor ieder hergebruik moet u de tafel laten desinfecteren, inspecteren en onderhouden volgens de instructies in §7.

## 6.5 Beëindiging van gebruik

Aan het eind van de levensduur dient u uw tafel af te voeren volgens de lokale milieuwetgeving. U kunt best de tafel demonteren om transport van recyclebare materialen te vergemakkelijken.

# 7 Technische gegevens

<b>Merk</b>	Vermeiren
<b>Type</b>	Tafel
<b>Model</b>	378

<b>Omschrijving</b>	<b>Afmetingen</b>
Max. belasting	10 kg
Totale hoogte	640 - 820 mm
Hoogte tafel	620 - 800 mm
Lengte	950 mm
Breedte	600 - 850 mm
Hoek tafelblad	0° - 18° - 36° - 54° - 72° - 90°
Hoogte onderframe	215 mm
Vrije hoogte boven de grond	60 mm
Oppervlakte tafelblad (L x B)	950 x 500 mm
Gewicht	11,30 kg
Diameter wielen	50 mm
Opslagtemperatuur	+5°C - +45°C
Opslagluchtvochtigheid	20% - 75%

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°



## Service registration form

This product (name): .....

was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:
By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:	By (stamp):  Kind of work: I / S / R / D Date:



Vermeiren GROUP  
Vermeirenplein 1 / 15  
2920 Kalmthout  
BE

website: [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

## Instructies voor de vakhandelaar

Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.

Versie: A, 2020-07

Basic UDI: 5415174 1803378 LS

## Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.

Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gekopieerd of verspreid.

© Vermeiren Group 2020