

Belangrijke mededeling

CORRECTIEVE BIJLAGE BETREFFENDE LADEN

Gebruik ENKEL de instructies in deze mededeling om de batterijen van uw rolstoel op te laden.

De originele instructies uit de gebruiksaanwijzing betreffende het laden van de batterijen, vervallen.

Deze bijlage maakt deel uit van de gebruiksaanwijzing van uw rolstoel.

We raden u aan om deze mededeling grondig door te lezen. Als u nog vragen heeft, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.



Veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel of beschadiging door brand

- Gebruik enkel de batterij(en) en lader die geleverd werden bij uw product. Het gebruiken van een andere batterij of lader kan gevaarlijk zijn (brandgevaar).
Contacteer uw vakhandelaar voor eventuele vervanging.
- Open of vervang in geen geval zelf de batterij, lader, kabels, stekkers of een van de aansluitpunten!
- De lader is enkel bedoeld om de batterij(en) op te laden die geleverd werden bij uw rolstoel, geen andere batterijen.
- Bescherm de batterij en batterijlader tegen vlammen, hoge temperaturen ($>50^{\circ}$), vochtigheid, zon, hevige schokken (bijvoorbeeld vallen). Gebruik de batterij NIET als ze is blootgesteld aan een van de voornoemde omstandigheden.
- Laad de batterij op met de geleverde lader, binnenshuis, in een goed geventileerde ruimte, buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik geen verlengsnoeren bij het laden.



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

De batterijen zullen korter of langer meegaan afhankelijk van het gebruik, terrein en de rijomstandigheden.

Als u een uitstap plant, houd dan rekening met de laadstatus van de batterij. Wees u bewust van de actieradius van de batterij (zie technische details in de gebruiksaanwijzing).



VOORZICHTIG

Gevaar op schade aan de batterij en/of daling van de levensduur

- Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de lader en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
- Onderbreek de laadcyclus niet; wacht tot de lader aangeeft dat de batterij volledig opgeladen is (zie de gebruiksaanwijzing van de lader). Vermijd het opladen in korte periodes.
Opmerking: dit geldt NIET voor Lithium-batterijen.
- De batterij kan onherstelbaar beschadigd raken indien ze volledig ontladen wordt. Zorg er daarom steeds voor dat de batterij tijdig wordt opgeladen:
 - Bij intensief gebruik (lange afstanden, dagelijks gebruik): Onmiddellijk laden na gebruik, gestarte ladingen niet onderbreken.
 - Bij gemiddeld gebruik (korte afstanden, dagelijks of enkele malen per week): Laden wanneer de batterij-indicatie 50% ontlading aangeeft, gestarte ladingen niet onderbreken.
 - Bij laag gebruik of opslag: éénmaal per week laden, gestarte ladingen niet onderbreken.
- De levensduur van de batterij daalt als ze wordt blootgesteld aan extreme koude voor een langere periode (zie technische details in de gebruiksaanwijzing).
- Zorg ervoor dat alle aansluitpunten op de batterij, alsook het aansluitpunt in de batterijhouder, vrij zijn van stof of vuil.
- Bescherm de batterij tegen grote blootstelling aan elektromagnetische straling.

Laad instructies

1. Schakel de rolstoel UIT.
2. Verbind EERST de batterijlader met een 230V AC stopcontact.
3. Verbind de oplader met de batterij.
4. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de lader voor meer informatie over de indicatoren op de lader.
5. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, koppel dan de batterij los van de lader.
6. Verwijder de lader uit het stopcontact, laat afkoelen en bewaar op een droge plaats.
7. Zet de rolstoel AAN en ga na of alle lampjes op de batterij statusindicator branden.

i In geval van problemen waardoor de batterij niet opgeladen kan worden volgens de gebruiksaanwijzing van de lader, neem dan contact op met uw vakhandelaar.

Wanneer het bedieningspaneel de probleemcode "rijden belemmerd" aangeeft na het opladen, ga dan na of de batterijlader werd losgekoppeld. Deze veiligheidsmaatregel voorkomt dat u kan rijden terwijl de lader nog verbonden is met het stroomnet.

