



1. Onderdelen

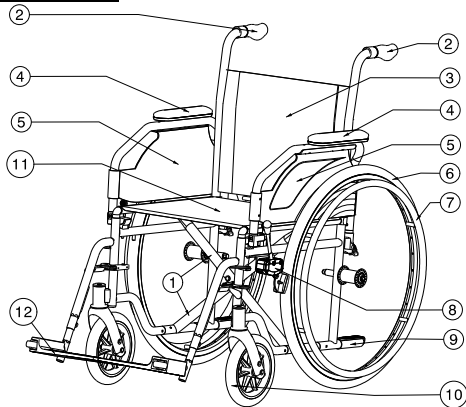

Volgnr.	Omschrijving	Aantal	Volgnr.	Omschrijving	Aantal
1	Kruis	1	7	Grijphoepels	2
2	Handgrepen	2	8	Remmen	2
3	Rug	1	9	Trapdop	1
4	Armkussens	2	10	Stuurwielen	2
5	Armsteunen	2	11	Zit	1
6	Aandrijfwielen	2	12	Voetsteunen	2


2. Monteren / verwijderen aandrijfwielen (quick release as aanwezig)

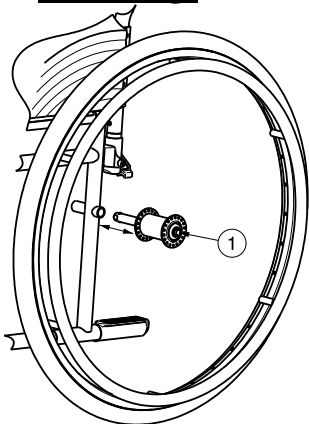

Druk op drukknop ①.

3. Uitvouwen / opvouwen rolstoel


Uitvouwen: Duw op de handgrepen en trek deze uit elkaar. Vervolgens duwt U op de zitbuizen, totdat de rolstoel **volledig** is uitgevouwen.

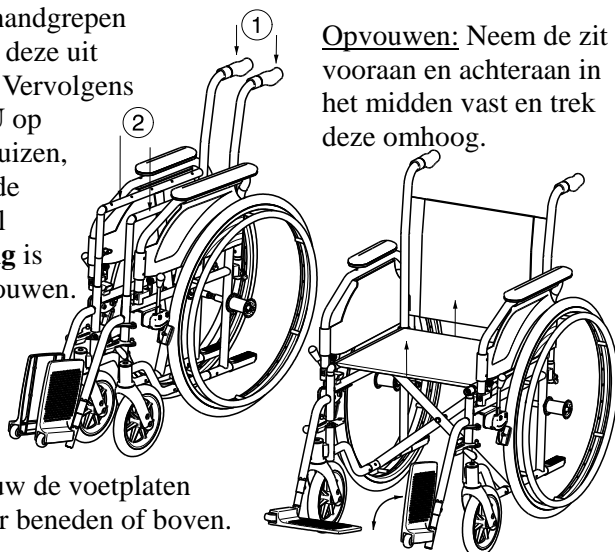

Opvouwen: Neem de zit vooraan en achteraan in het midden vast en trek deze omhoog.


Vouw de voetplaten naar beneden of boven.

Voorbehouden technische wijzigingen – vB - 2013-11

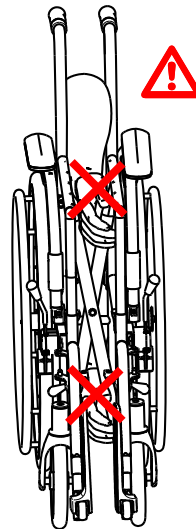


Gevaar voor letsel - Plaats uw vingers niet tussen het kruis!


4. Monteren / verwijderen voetsteunen

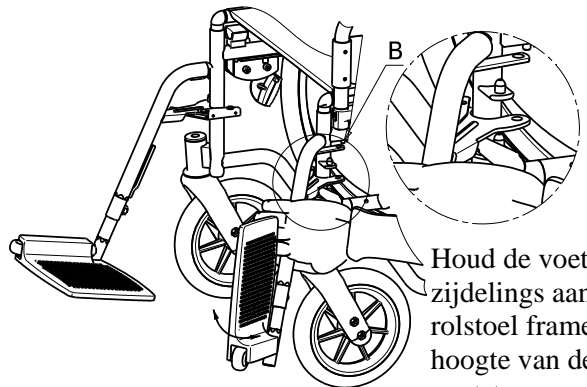

Houd de voetsteun zijdelings aan het rolstoel frame ter hoogte van de voetsteun bevestigingen.

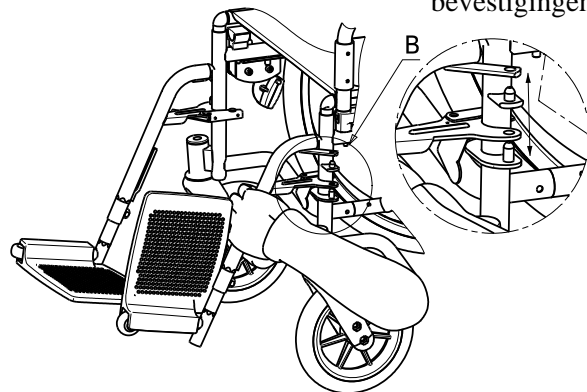


Trek eerst hendel ① naar voren om de voetsteun te kunnen verwijderen.

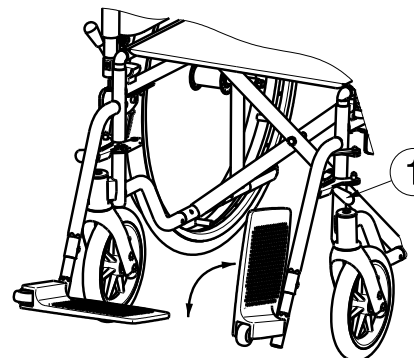


Vouw de voetplaten naar beneden of boven.

5. Instellen van de voetsteun

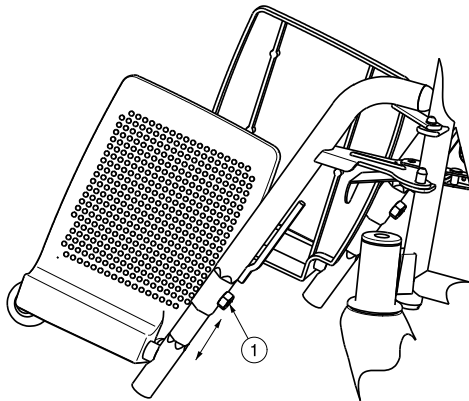



Draai schroef ① los om de voetsteun te verstellen.

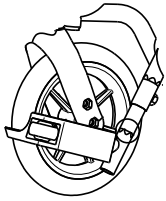

De minimum lengte is wanneer de buis van de voetsteun veranderd van hexagonaal naar rond.


De maximum lengte is aan het merkteken in de buis (Dit merkteken is een rechte streep) en voetplaat meer dan 60 mm van de grond.

6. Monteren / verwijderen armsteunen

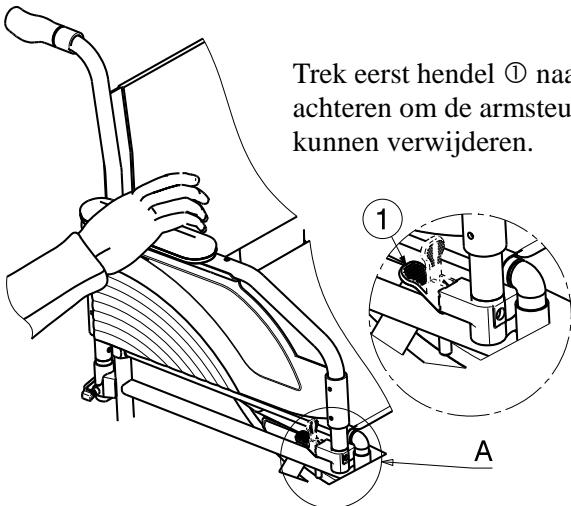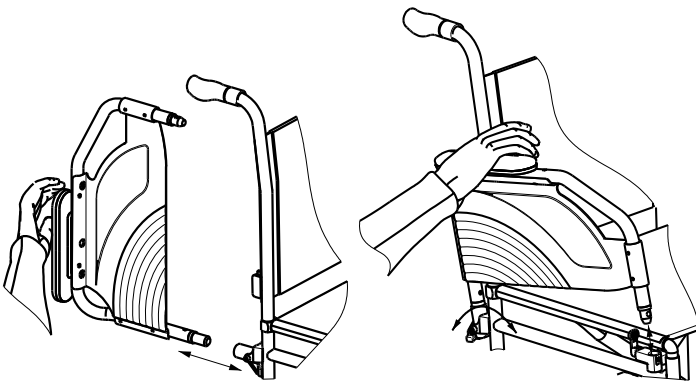

Trek eerst hendel ① naar achteren om de armsteun te kunnen verwijderen.


7. Bedienen van de rem

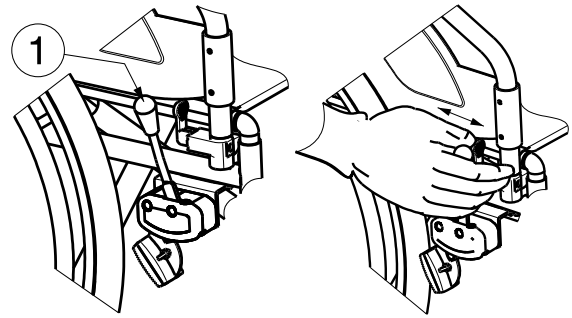

Neem hendel ① vast om de rem te activeren.

8. Zit in een motorvoertuig (gecrash test)

De bevestigingspunten om de rolstoel + patiënt vast te maken zijn gemarkeerd op de rolstoel met symbool.

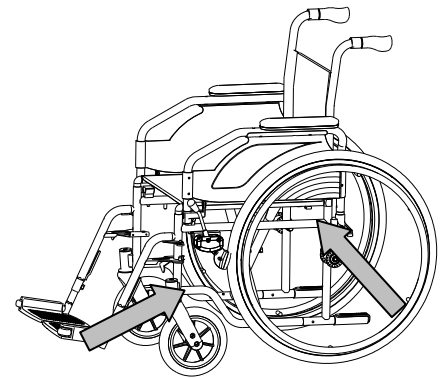

9. Rijden met de rolstoel



Helling



Afrijden trottoir

Voorwaarts



Achterwaarts



Oprijden trottoir

Met begeleider



Zonder begeleider

Zonder begeleider