

# VERMEIREN

Onderhoudshandleiding  
Elleboogkrukken



## ONDERHOUDSHANDLEIDING

### elleboogkrukken

#### 1. Verzorging

Gebruik alleen een zeepoplossing om te reinigen. Het reinigingsmiddel moet in ieder geval een pH-waarde van min. 6 hebben. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen. Volg de aanwijzingen op de betreffende verzorgingsmiddelen. Voor het reinigen gebruikt U een vochtige doek en lauw water. Maak het product niet te nat. Gebruik geen metaalborstel of andere scherpe reinigingsmiddelen. Bij schade aan de lak dient U contact op te nemen met de vakhandelaar. Door een regelmatig onderhoud blijft Uw product perfect functioneren.

#### 2. Desinfecteren

De desinfectie mag alleen door een geschoolde sanitaire medewerker of een door hem/haar opgeleide persoon worden uitgevoerd. Contacteer Uw vakhandelaar. Lees de gebruikersinstructies van de schoonmaak producten. De schuurdesinfectie mag alleen worden gebruikt met de desinfectieoplossingen en de gebruiksverduunningen die zijn aanbevolen door het Robert-Koch-Instituut ([www.rki.de](http://www.rki.de)).

#### 3. Reparatie / onderhoud / inspectie

De verwachte levensduur van de elleboogkruk wordt beïnvloed door het gebruik, opslag, regelmatig onderhoud en schoonmaak. Gebruik alleen originele onderdelen van VERMEIREN. Reparaties mogen alleen door speciaal opgeleid personeel worden uitgevoerd. Maak gebruik van de services van de vakhandelaar. Hij helpt U graag bij het onderhouden en repareren van onze producten.

**Voor elk gebruik moet Uw elleboogkruk worden geïnspecteerd. Hierbij moeten de volgende punten worden gecontroleerd:**

- Volledigheid
- Functie voor hoogte instelling
- Frame (vervorming, stabiliteit, bevestigingen)
- **Lakschade (eventuele roestplekken verwijderen en met lak behandelen) en controleer corrosie of beschadiging aan de palletjes**

**Om de 8 weken:**

- Draai de rubberen dop een kwartslag. Dit vermindert de slijtage op één plek. Controleer de staat van de dop, indien nodig vervang deze.

**Elke 6 maanden of voor elke nieuwe gebruiker moeten volgende punten geïnspecteerd worden:**

- Algemeen nazicht
- Reinigen
- Desinfectie (voor hergebruik)

#### 4. Verpakking en opslag

Om de elleboogkruk te verpakken of te bewaren dienen volgende instructies te worden gevolgd:

- Alleen in een droge ruimte opslagen (tussen +5°C en +41°C).
- De relatieve luchtvochtigheid van 30% tot 70%.
- Beschermen door voldoende afdekking of verpakking tegen roest en binnendringen van vreemde voorwerpen (bijv. zout water, zeelucht, zand, stof)
- Alle componenten moeten onbelast worden bewaard (geen te zware voorwerpen op de elleboogkrukken leggen, nergens tussen klemmen, ...)

#### 5. Garantie

Uittreksel uit de algemene verkoopsvoorwaarden:

(...)

5. De verjaringstermijn voor garantie aanspraken bedraagt 24 maanden.

(...)

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door constructieve wijzigingen aan onze producten, gebrekkig onderhoud, gebrekkige of onoordeelkundige behandeling of bewaring of gebruik van niet-originele wisselstukken. De garantie op slijtagedelen of onderdelen die onderhevig zijn aan een natuurlijke slijtage, is eveneens uitgesloten.

#### 6. Afvalverwerking

Als U de elleboogkrukken wilt wegdoen, stelt U zich in verbinding met de plaatselijke verantwoordelijken of bezorgt U het product terug bij de vakhandel. Deze kan, na hygiënische reiniging, de krukken aan de fabrikant terugsturen. De fabrikant kan voor vakkundige verwerking en hergebruik (gescheiden naar grondstof) zorg dragen.

Verpakkingsmateriaal kan bij de betreffende verwerkingsplaatsen en hergebruikinstellingen of bij Uw vakhandelaar afgegeven worden.